

Istruzioni per l'uso di Wegovy

Prima di iniziare a utilizzare la penna Wegovy FlexTouch una volta alla settimana, **legga sempre attentamente queste istruzioni** e parli con il suo medico, infermiere o farmacista su come eseguire correttamente l'iniezione di Wegovy.

La penna Wegovy è una penna per la somministrazione della dose che **contiene quattro dosi di Wegovy, corrispondenti ad un utilizzo una volta alla settimana, per quattro settimane.**

Usi la tabella all'interno del coperchio della confezione per tenere traccia delle iniezioni che ha eseguito e delle dosi rimanenti nella penna.

Wegovy è disponibile in cinque diverse formulazioni, ciascuna contenente una delle seguenti dosi di semaglutide:

0,25 mg

0,5 mg

1 mg

1,7 mg

2,4 mg

Prima di iniziare, controlli sempre l'etichetta della penna per assicurarsi che contenga la dose che le è stata prescritta di Wegovy.

La penna è progettata per essere utilizzata con aghi monouso 30G, 31G e 32G, di lunghezza fino a 8 mm.

La confezione contiene:

- Penna Wegovy
- 4 aghi NovoFine Plus
- Foglio illustrativo

Penna Wegovy FlexTouch




Nota: la sua penna può differire per dimensioni e l'etichetta della sua penna potrebbe differire nel colore dall'esempio mostrato nelle immagini. Queste istruzioni sono valide per tutte le penne Wegovy FlexTouch.



Ago NovoFine Plus (esempio)



1 Preparazione della penna con un nuovo ago
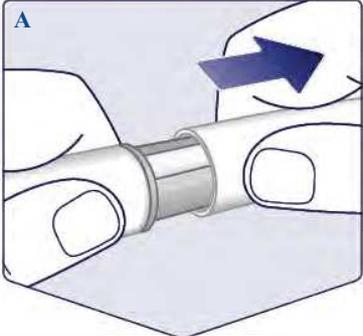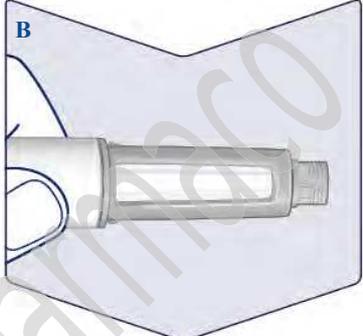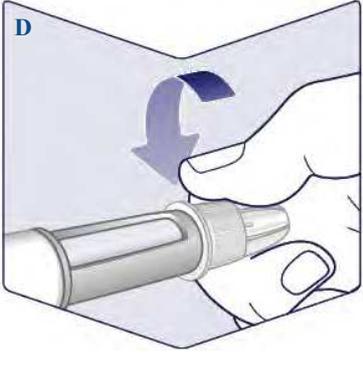
<p>Controlli il nome e la dose della penna per assicurarsi che contenga la dose che le è stata prescritta di Wegovy.</p> <p>Tolga il cappuccio della penna.</p> <p>(Vedere figura A).</p>	
<p>Controlli che la soluzione di Wegovy all'interno della penna sia chiara e incolore.</p> <p>Guardi attraverso la finestra della penna. Se Wegovy appare torbido o colorato, non usi la penna.</p> <p>(Vedere figura B)</p>	
<p>Usi sempre un ago nuovo per ogni iniezione.</p> <p>Prenda un nuovo ago quando è pronto a eseguire l'iniezione.. Controlli che il sigillo protettivo e il cappuccio esterno dell'ago non presentino danni che potrebbero compromettere la sterilità. Se nota un qualsiasi tipo di danno, utilizzi un nuovo ago.</p> <p>Rimuova il sigillo protettivo.</p> <p>(Vedere figura C).</p>	
<p>Spinga l'ago direttamente sulla penna. Lo ruoti fino a quando non è fissato saldamente.</p> <p>(Vedere figura D).</p>	

L'ago è coperto da due cappucci. È necessario rimuoverli entrambi.

Se dimentica di rimuovere entrambi i cappucci, la dose di Wegovy non verrà iniettata.

Rimuova il cappuccio esterno dell'ago e lo conservi per dopo. Le servirà per rimuovere in sicurezza l'ago dalla penna dopo l'iniezione.

Rimuova il cappuccio interno dell'ago e lo getti via. Può comparire una goccia di Wegovy sulla punta dell'ago. Deve comunque controllare il flusso di Wegovy se utilizza una penna nuova per la prima volta. Vedere il paragrafo **“Controllo del flusso con ogni nuova penna”**.

Non usi mai un ago piegato o danneggiato. Per ulteriori informazioni sulla manipolazione degli aghi, vedere il paragrafo **“Informazioni sugli aghi”** sotto queste istruzioni.

(Vedere figura E).




Controllo del flusso con ogni nuova penna

Se la sua penna Wegovy è già in uso, vada al paragrafo **“2 Impostazione della dose”**.

Controlli il flusso di Wegovy solo prima della **prima iniezione con ogni nuova penna**.

Ruoti il selettore della dose fino a quando vede il simbolo di controllo del flusso (•••).

(Vedere figura F).

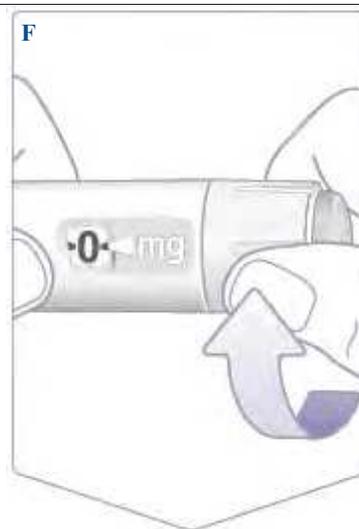

Si assicuri che il simbolo di controllo del flusso sia allineato con l'indicatore della dose.

(Vedere figura G).



Controllo del flusso

Tenga la penna con l'ago rivolto verso l'alto.

Tenga premuto il pulsante di iniezione fino a quando il contatore della dose ritorna a **0**. Il simbolo **0** deve essere allineato con l'indicatore della dose.

Deve comparire una goccia di Wegovy sulla punta dell'ago. Questa goccia indica che la penna è pronta per l'uso.

Se la goccia non compare, controlli nuovamente il flusso. **Questa operazione deve essere eseguita solo due volte.**

Se non compare ancora nessuna goccia, **sostituisca l'ago e controlli ancora una volta il flusso.**

Non usi la penna se non è ancora comparsa una goccia di Wegovy.

(Vedere figura H),



2 Impostazione della dose

Ruoti il selettore della dose fino a quando **il contatore della dose si ferma e mostra la dose prescritta.**

(Vedere figura I).



La linea tratteggiata (|) nel contatore della dose la guiderà alla sua dose prescritta.

Il selettore della dose emette un scatto diverso quando viene ruotato in avanti, all'indietro o quando viene superata la dose. Si sentirà un "clic" ogni volta che il selettore della dose ruota. Non imposti la dose contando il numero di scatti che sente.

(Vedere figura J).



Quando la dose prescritta è allineata con l'indicatore della dose, significa che lei ha selezionato la sua dose. Nella figura a fianco, viene mostrata la dose **0,25 mg** come esempio.

Se il contatore della dose si ferma prima di raggiungere la dose prescritta, consulti il paragrafo **"La quantità di Wegovy è sufficiente?"** presente in queste istruzioni.

(Vedere figura K).




Esempio:
0,25 mg selezionati

Scelta del sito d'iniezione

Scelga la parte superiore delle braccia, la parte superiore delle gambe o l'addome (mantenendo una distanza di 5 cm dall'ombelico).

Lei può praticare l'iniezione nella stessa area del corpo ogni settimana, ma si assicuri che non sia nello stesso punto usato l'ultima volta.

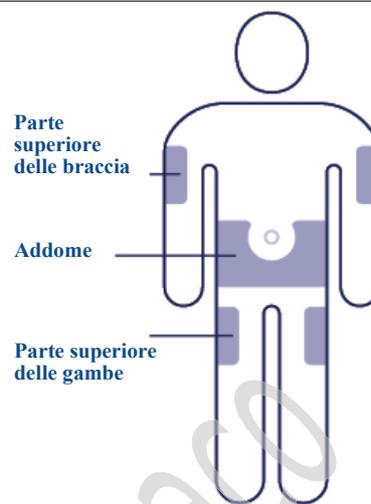


3 Iniezione della dose

Inserisca l'ago nella pelle.

Si assicuri che il contatore della dose sia visibile. Non lo copra con le dita, poiché l'iniezione potrebbe interrompersi.

(Vedere figura L).

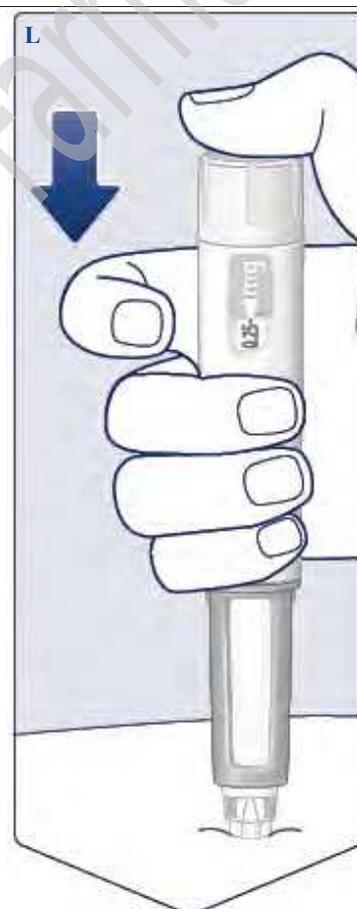

Prema e tenga premuto il pulsante di iniezione fino a quando il contatore della dose mostra il simbolo **0.**

(Vedere figura M).

Continui a premere il pulsante di iniezione con l'ago nella pelle e conti lentamente fino a 6. Il simbolo **0** deve essere allineato con l'indicatore della dose. Sentirà uno scatto quando il contatore della dose torna a **0**.

(Vedere figura N).




Estragga l'ago dalla pelle. Se l'ago viene rimosso prima del previsto, un flusso di Wegovy potrebbe fuoriuscire dalla punta dell'ago e non verrebbe erogata la dose completa.

Se compare del sangue nel sito d'iniezione, eserciti una leggera pressione sull'area per fermare il sanguinamento.

Dopo l'iniezione può essere presente una goccia di Wegovy sulla punta dell'ago. Questo è normale e non influisce sulla dose.

(Vedere figura O).

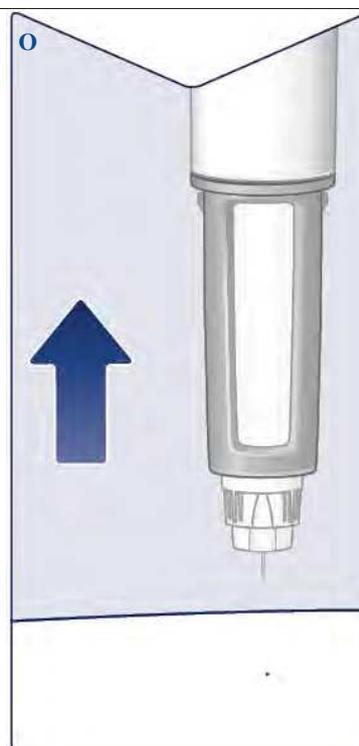


4 Dopo l'iniezione

Inserisca la punta dell'ago nel cappuccio esterno dell'ago appoggiato su una superficie piana senza toccare l'ago o il cappuccio esterno dell'ago.

Una volta coperto l'ago, prema completamente il cappuccio esterno dell'ago con cautela.

(Vedere figura P).

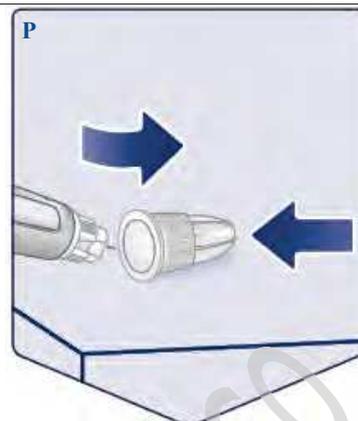


Sviti l'ago e lo smaltisca con cura secondo le istruzioni del medico, dell'infermiere, del farmacista o delle autorità locali.

Non cerchi mai di rimettere il cappuccio interno dell'ago sull'ago. Potrebbe pungersi con l'ago.

Getti sempre l'ago subito dopo ogni iniezione per evitare l'ostruzione degli aghi, la contaminazione, infezioni e un dosaggio errato. **Non conservi mai la penna con l'ago inserito.**

(Vedere figura Q).

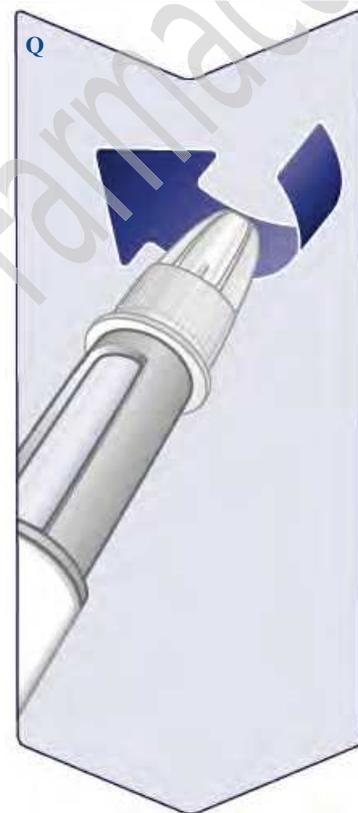

Rimetta il cappuccio della penna dopo ogni uso per proteggere Wegovy dalla luce.

(Vedere figura R).



Quando la penna è vuota, la getti via senza ago come indicato dal medico, infermiere, farmacista o dalle autorità locali.

Il cappuccio della penna e la confezione vuota possono essere smaltiti nei rifiuti domestici.

Informazioni sugli aghi

Come identificare un ago ostruito o danneggiato

- Se sul contatore della dose non compare il simbolo **•0•** dopo aver premuto continuamente il pulsante d'iniezione, è possibile che sia stato usato un ago ostruito o danneggiato.
- In questo caso, **non** è stata somministrata alcuna dose di Wegovy, anche se il contatore della dose si è spostato dalla dose originaria impostata.

Come gestire un ago bloccato

- Sostituisca l'ago come indicato nel paragrafo "**1 Preparazione della penna con un nuovo ago**" e vada al paragrafo "**2 Impostazione della dose**".

Manutenzione della penna


Tratti la penna con cura. Un uso disattento o errato può causare una somministrazione errata. In tal caso, è possibile che non si ottenga l'effetto desiderato da Wegovy.

- Consulti il retro di questo foglio illustrativo per leggere le condizioni di conservazione della penna.
- **Non inietti Wegovy se è stato esposto alla luce solare diretta.**

- **Non sottoponga Wegovy a congelamento e non inietti mai Wegovy se è stato congelato.** Smaltisca la penna.
- **Non faccia cadere la penna** e non la faccia urtare contro superfici dure.
- **Non cerchi di riempire nuovamente la penna.** Una volta vuota, deve essere gettata via.
- **Non cerchi di riparare o di smontare la penna.**
- **Non esponga la penna a polvere, sporco o liquidi.**
- **Non lavi, immerga in un liquido o lubrifici la penna.** Se necessario, la pulisca con un detergente neutro su un panno inumidito.

La quantità di Wegovy è sufficiente?

Se il contatore della dose si ferma prima di raggiungere la dose prescritta, significa che non è rimasta una quantità sufficiente di Wegovy per una dose completa. Smaltisca la penna Wegovy e utilizzi una nuova penna.

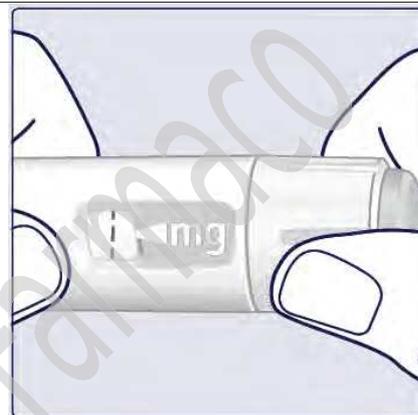

Informazioni importanti

- **Inietti solo una dose di Wegovy una volta alla settimana.** Se non assume Wegovy come prescritto, potrebbe non ottenere l'effetto desiderato di questo medicinale.
- Se assume più di un tipo di medicinale iniettabile, è molto **importante controllare il nome e la dose** sull'etichetta della penna **prima dell'uso.**
- **Se ha problemi di vista e non è in grado di seguire queste istruzioni, non usi questa penna senza l'aiuto di qualcuno.** Chieda aiuto a una persona con una buona vista che sia adeguatamente formata per usare la penna Wegovy.
- Tenga sempre la penna e gli aghi **fuori dalla vista e dalla portata degli altri, specialmente dei bambini.**
- **Non condivida mai** la penna o gli aghi con altre persone.
- **Gli aghi sono esclusivamente monouso. Non riutilizzi mai gli aghi,** questo evita l'ostruzione degli aghi, la contaminazione, infezioni e un dosaggio errato.
- Le persone che prestano assistenza **devono fare molta attenzione nel maneggiare gli aghi usati,** al fine di evitare lesioni da puntura d'ago accidentali e infezioni.