


Guida ai componenti

Componenti di Mounjaro KwikPen

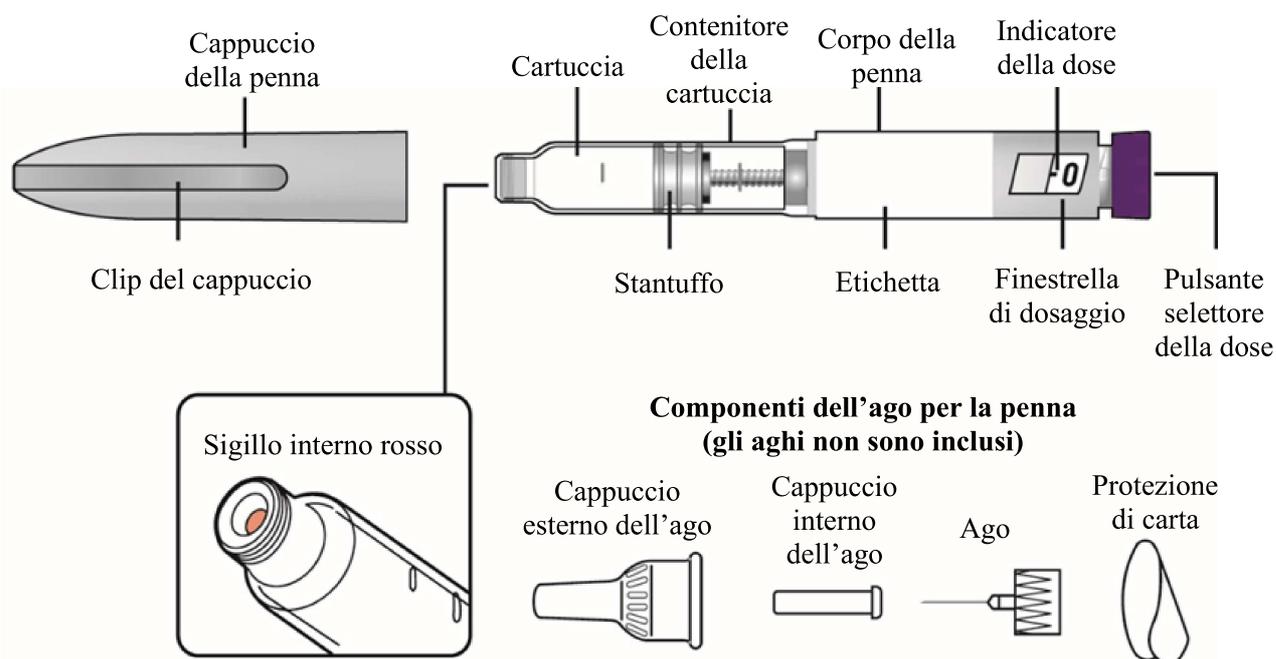


Ago compatibile con la KwikPen (se non sa quale ago per penna usare, si rivolga al personale sanitario)

Materiali necessari per effettuare l'iniezione


- Mounjaro KwikPen
- Ago compatibile con la KwikPen (se non sa quale ago per penna usare, si rivolga al personale sanitario)
- Tampone, garza o batuffolo di cotone
- Contenitore per lo smaltimento di oggetti taglienti o contenitore domestico

Preparare l'iniezione di Mounjaro KwikPen

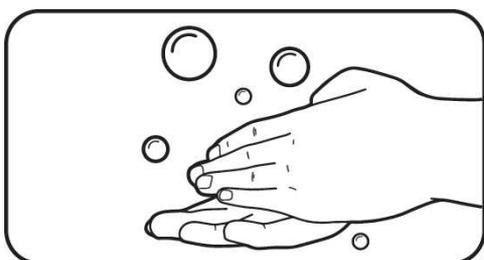

Punto 1:


- Si lavi le mani con acqua e sapone.

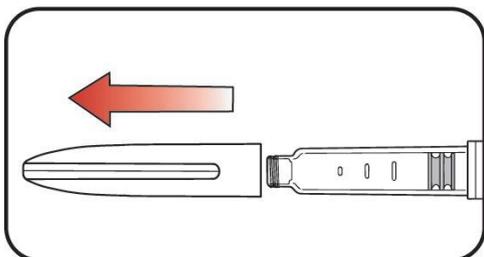

Punto 2:


- Rimuova il cappuccio della penna.
- Controlli la penna e l'etichetta. **Non** usi la penna se:
 - il nome del medicinale o il dosaggio non corrispondono a ciò che le è stato prescritto.
 - la penna è scaduta (Scad.) o sembra danneggiata.
 - il medicinale è stato congelato, presenta particelle, è torbido o ha cambiato colore.

Mounjaro deve essere da incolore a leggermente giallo.

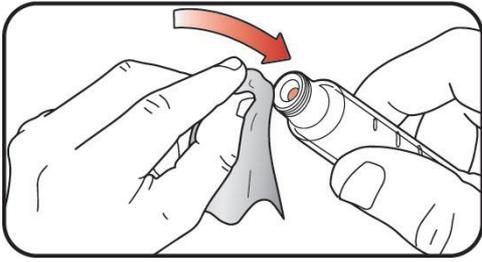


Punto 3:

- Pulisca il sigillo interno rosso con un tampone.

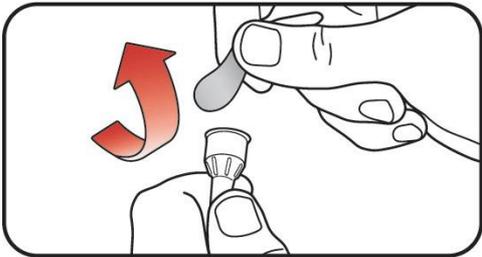


Punto 4:

- **Prenda un ago nuovo per la penna.** Utilizzi sempre un nuovo ago per ogni iniezione per aiutare a prevenire infezioni e blocchi dell'ago.
- Rimuova la protezione di carta dal cappuccio esterno dell'ago.

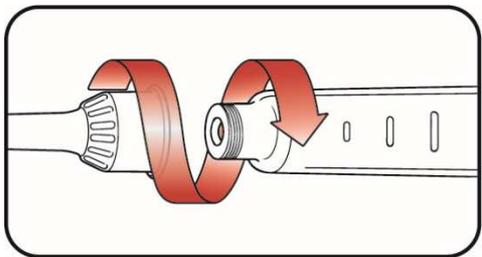

Punto 5:

- Inserisca l'ago coperto dal cappuccio in maniera dritta all'estremità della penna e ruoti l'ago finché risulta ben fissato.

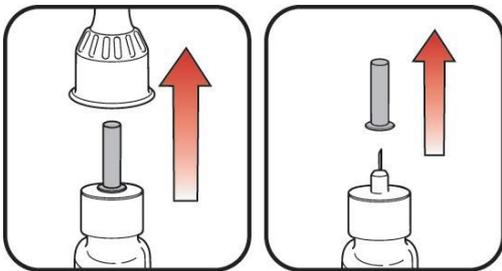


Punto 6:

- a. Rimuova il cappuccio esterno dell'ago e lo conservi. Verrà riutilizzato.
- b. Rimuova il cappuccio interno dell'ago e lo getti via.


a. Cappuccio esterno dell'ago

b. Cappuccio interno dell'ago

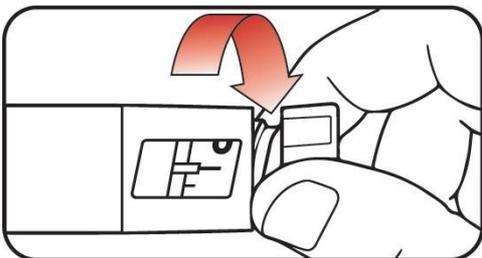


Punto 7:

- Ruoti lentamente il pulsante selettore della dose fino a sentire **2 scatti** e vedere la linea più lunga  nella finestrella di dosaggio. Questa è la posizione di caricamento. Può essere corretta ruotando il pulsante selettore della dose in entrambe le direzioni fino a quando la posizione di caricamento si allinea all'indicatore di dose.

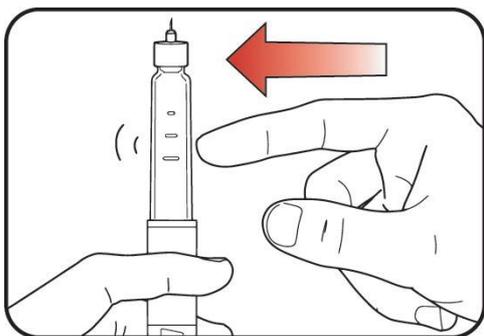

Punto 8:

- Tenga la penna con l'ago rivolto verso l'alto.
- Picchietti delicatamente il contenitore della cartuccia per raccogliere le bolle d'aria in cima.

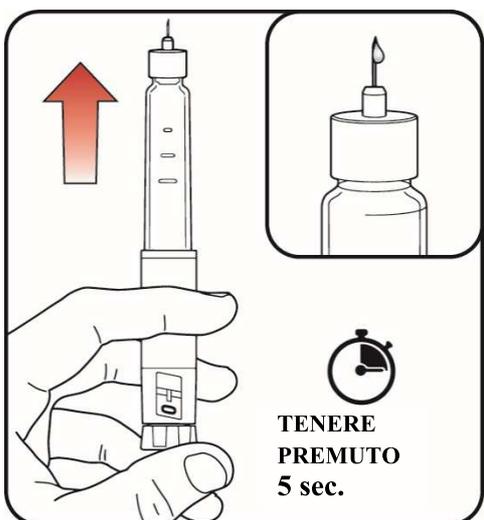


Punto 9:

- Faccia uscire fuori un po' di medicinale **premendo il pulsante selettore della dose** finché non si ferma, poi **conti lentamente fino a 5 mentre tiene premuto il pulsante selettore della dose**. Nella finestrella di dosaggio deve essere mostrato il simbolo **0**. **Non** si faccia l'iniezione.

Il caricamento rimuove l'aria dalla cartuccia e garantisce che la penna funzioni correttamente. La penna è stata caricata se una piccola quantità di medicinale fuoriesce dalla punta dell'ago della penna.

- Se non vede il medicinale, ripeta le operazioni **dal punto 7 al 9** per non più di altre 2 volte.
- Se ancora non vede il medicinale, cambi l'ago per penna e ripeta le operazioni **dal punto 7 al 9** per non più di 1 volta ancora.
- Se non vede ancora il medicinale, contatti la filiale locale dell'Azienda produttrice **Lilly** riportata nel foglio illustrativo per il paziente.

Iniezione di Mounjaro KwikPen

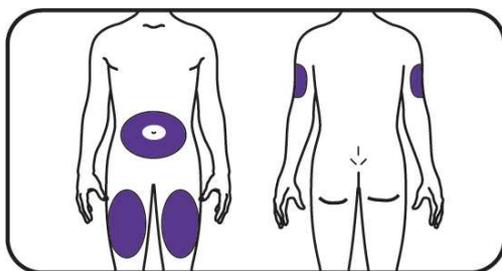

a. Davanti

b. Dietro


Punto 10:

- Scelga il sito d'iniezione
 - a. Lei o un'altra persona può iniettare il medicinale nella coscia o nella zona della pancia (addome) ad almeno 5 cm dall'ombelico.
 - b. Un'altra persona può farle l'iniezione nella parte posteriore del braccio.
- **Cambi** il sito d'iniezione ogni settimana. Può usare la stessa zona del corpo, ma deve essere sicuro di scegliere un sito di iniezione diverso all'interno di tale area.



Punto 11:

- Ruoti il pulsante selettore della dose finché non si ferma e nella finestrella di dosaggio viene mostrato il simbolo **1**. Il simbolo **1** indica una dose completa.

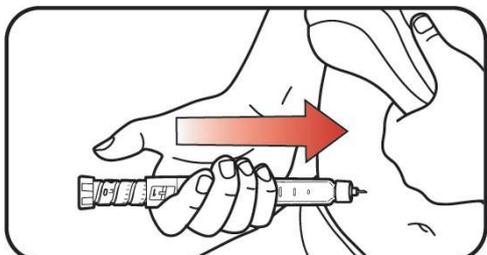


Punto 12:

- a. Inserisca l'ago nella cute.




- b. Inietti il medicinale **premendo il pulsante selettore della dose** finché non si ferma poi **conti lentamente fino a 5 mentre tiene premuto il pulsante selettore della dose**. Prima di rimuovere l'ago, nella finestrella di dosaggio deve essere mostrato il simbolo **0**.

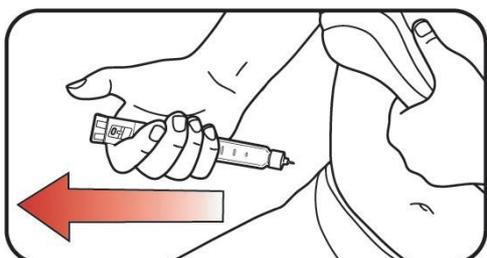

Punto 13:


- Tolga l'ago dalla cute. Una goccia di medicinale sulla punta dell'ago è normale. Essa non avrà conseguenze sulla dose.
- Verifichi che sia presente il simbolo **0** nella finestrella di dosaggio. Se vede il simbolo **0** nella finestrella di dosaggio, ha ricevuto la dose completa. Se non vede il simbolo **0** nella finestrella di dosaggio, inserisca di nuovo l'ago nella cute e finisca l'iniezione. **Non** selezioni di nuovo la dose. Se pensa ancora di non aver ricevuto la dose completa, **non** ricominci o ripeta l'iniezione. Contatti la filiale locale dell'Azienda produttrice **Lilly** riportata nel foglio illustrativo per il paziente.

Dopo l'iniezione di Mounjaro KwikPen

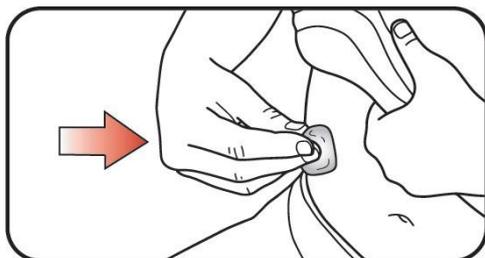


Punto 14:

- Se vedi del sangue dopo che hai rimosso l'ago dalla cute, premi leggermente sul sito d'iniezione con una garza o un batuffolo di cotone. **Non** strofini il sito d'iniezione.

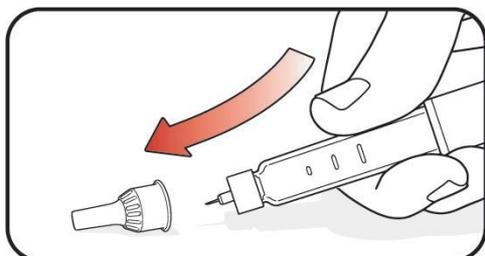


Punto 15:

- Riponga con attenzione il cappuccio esterno sull'ago.

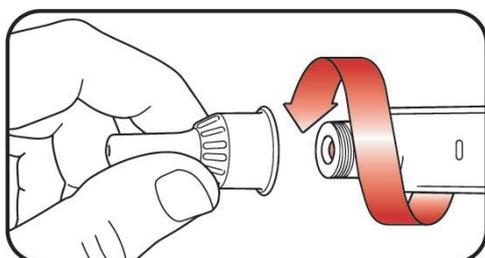

Punto 16:

- Sviti l'ago coperto dal cappuccio e lo metta in un contenitore per lo smaltimento di oggetti taglienti (vedere "Smaltimento di Mounjaro KwikPen e degli aghi per penna"). **Non** conservi la penna con l'ago inserito al fine di prevenire fuoriuscite, il blocco dell'ago e l'ingresso di aria all'interno della penna.

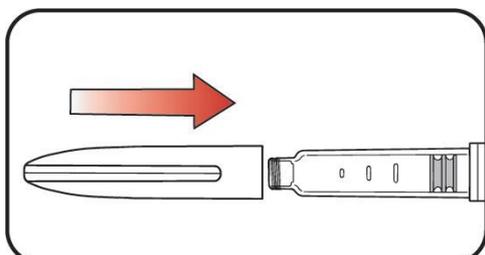

Punto 17:

- Riposizioni il cappuccio sulla penna. **Non** conservi la penna senza il cappuccio inserito.

Conservare Mounjaro KwikPen

Penne non usate:

- Conservare le **penne non usate** nel **frigorifero** tra 2°C e 8°C.
- Le penne non usate possono essere utilizzate fino alla data di scadenza stampata sull'etichetta se la penna è stata tenuta in frigorifero.
- **Non** congelare la penna. Eliminare (smaltire) la penna se è stata congelata.

Penne usate:

- Può conservare la **penna usata a temperatura ambiente** inferiore a 30°C dopo l'iniezione.
- Tenga la penna e gli aghi fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
- Smaltisca la penna 30 giorni dopo il primo utilizzo anche se nella penna è rimasto del medicinale.
- Smaltisca la penna dopo aver ricevuto 4 dosi settimanali. Il tentativo di iniettare il medicinale rimasto potrebbe risultare in una dose incompleta anche se la penna contiene ancora del medicinale.